

Sefam S.Box


BY
STARCK®



پرشین ایده آل سیستم (نماینده انحصاری)
Persian Ideal System
www.pisys.org



راهنمای کاربری دستگاه کمک تنفسی
Sefam S.Box

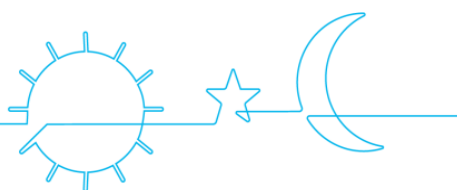

اجزای مختلف دستگاه



تصویر شماره (1)-نمای جلوی دستگاه




تصویر شماره (2)-نمای پشت دستگاه به همراه مرطوب کننده



تصویر شماره (3)-نمای پشت دستگاه بدون مرطوب کننده



تصویر شماره (4)-نمای صفحه گرم کننده و لوازم جانبی

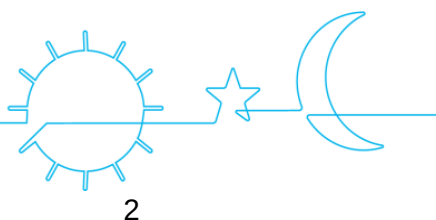


راهنمای اجزای مختلف دستگاه


1	① دکمه خاموش / روشن
2	صفحه نمایش لمسی : جهت دسترسی به اطلاعات و تنظیمات دستگاه
3	▴ دکمه Ramp : فعال / غیرفعال کردن عملکرد Ramp زمانی که دستگاه روشن است
4	دکمه push : اتصال محفظه آب مرطوب کننده یا پوشش محفظه آب
5	SD Card : محل قرار گیری کارت حافظه
6	کانکتور USB
7	فیلتر هوا : جهت جلوگیری از ورود گر و غبار به دستگاه
8	سوکت منبع تغذیه : اتصال منبع تغذیه به دستگاه
9	محل اتصال لوله مرطوب کننده به دستگاه با ATC
10	محل اتصال لوازم جانبی (آپشن های دلخواه) به دستگاه
11	صفحه گرم کننده : جهت گرم کردن آب داخل محفظه مرطوب کننده
12	محفظه آب (محفظه مرطوب کننده)
13	درب محفظه آب (مرطوب کننده)
14	محل اتصال لوله خرطومی

راهنمای کلیدهای صفحه نمایش لمسی

	کلید کنترل به پایین، جهت کاهش درجه مرطوب کننده		کلید پیمایش به بالا، جهت افزایش مقدار پارامتر نمایش داده شده
	تنظیم لوله مرطوب کننده با ATC به کمک این کلید		تنظیم میزان رطوبت مرطوب کننده عددی بین 1 تا 10
	کلید دسترسی به تنظیمات دستگاه		دسترسی به اطلاعات دستگاه
	کلید چند منظوره / تنظیم ماسک		بازگشت به خانه

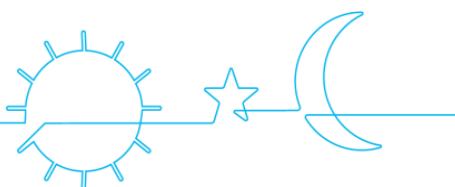


1- نحوه راه اندازی دستگاه

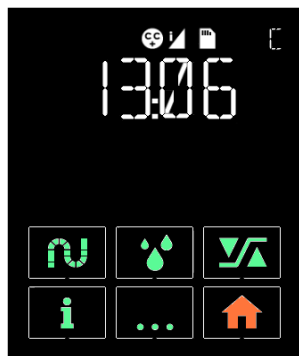


- اتصال مرطوب کننده به دستگاه
 - نصب لوله خرطومی و ماسک
 - اتصال منبع تغذیه به دستگاه و فشردن دکمه ① خاموش / روشن
- اگر ramp فعال باشد علامت آن  در صفحه نمایش نشان داده می شود که در صورت تمایل می توان با فشردن دکمه  آن را فعال یا غیر فعال کرد.


2- تنظیم ماسک بر روی صورت

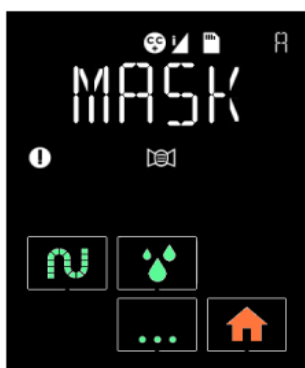

اگر پیام "MASK" روی صفحه نمایش ظاهر شد، بدین معناست که ماسک به درستی روی صورت قرار نگرفته است، در این صورت ماسک را محکم کرده و با زدن دکمه ① یا  دستگاه را مجدد راه اندازی کنید تا این پیام حذف شود.

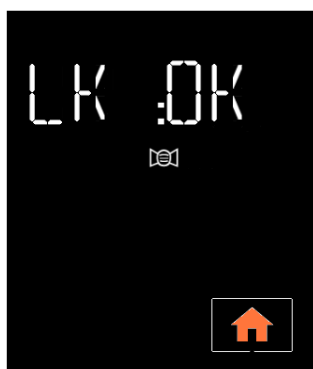

همچنین قبل از راه اندازی دستگاه می توان نصب صحیح ماسک بر روی صورت را بررسی کرد، که در این صورت پس از متصل کردن دستگاه به برق و تنظیم ماسک بر روی صورت، دکمه  فشرده، ماسک را طوری روی صورت تنظیم کنید تا پیام LK: OK نمایش داده شود. سپس با فشردن دکمه  به صفحه اصلی رفته و دستگاه را با فشردن مجدد دکمه ① راه اندازی کنید.

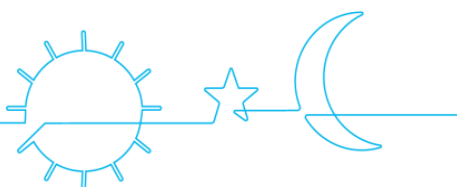

نحوه اتصال مرطوب کننده به دستگاه

1. برای استفاده از مرطوب کننده ابتدا باید با فشردن کلید دایره ای شکل بالای دستگاه فشرده تا دیواره کناری را از دستگاه جدا کرده.




2. برای اتصال مرطوب کننده ابتدا باید پلیت مرطوب کننده (صفحه گرم کننده) را در جایگاه درست خود قرار دهید سپس بعد از فیکس کردن پلیت در جای صحیح خود پلیت را با توجه به تصویر قفل کرده. به جهت ومحل قرارگیری سوکت مرطوب کننده توجه کنید.



3. برای قرار دادن مرطوب کننده بعد از قرار دادن پلیت در جای صحیح خود

مرطوب کننده را روی پلیت قرار داده به سمت داخل دستگاه هل داده تا زمانی که صدای کلیک شنیده شود. صدای کلیک به این معنا است که مرطوب کننده در جای صحیح خود قرار گرفته است.

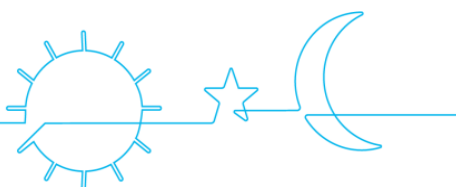


3- نحوه پر کردن محفظه آب مرطوب کننده




ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس لوله خرطومی را از دستگاه جدا کرده و کلید PUSH که در بالای دستگاه قرار دارد را فشار می دهید و محفظه مرطوب کننده را به سمت جلو بکشید تا از دستگاه جدا شود، داخل محفظه حداکثر تا مقدار مشخص شده- **↑ MAX ↑** (تا زیر خط سیاه رنگ) آب مقطر و یا آب جوشیده سرد شده بریزید. سپس درب محفظه آب را بسته و در جای خود نصب نمایید.

4- تنظیم میزان دمای مرطوب کننده

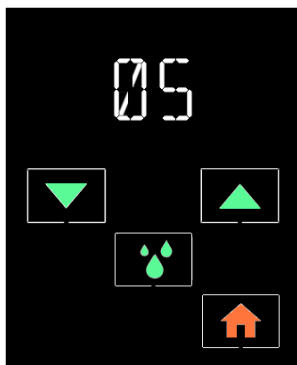


اگر دستگاه مجهز به مرطوب کننده باشد با روشن کردن دستگاه ، مرطوب کننده به صورت اتوماتیک شروع به کار می کند. جهت تنظیم دمای مرطوب کننده دکمه  را فشرده سپس با کمک دکمه های جهتی  یا  می توان دمای آن را تنظیم کرد که عددی بین ۱ تا ۱۰ می باشد.

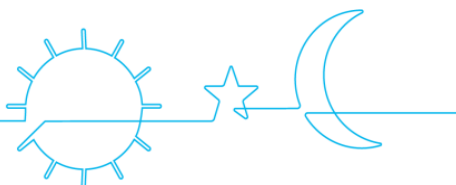

5- نحوه بارگذاری اطلاعات


جهت گزارش گیری و اعمال تغییرات در تنظیمات از یک کارت حافظه استفاده می شود که در قسمت در جهت فلش قرار می گیرد. برای این کار دستگاه می بایستی که به برق متصل باشد (دستگاه از بیمار جدا باشد). بعد از وصل کردن کارت حافظه تصویر زیر نمایش داده می شود.

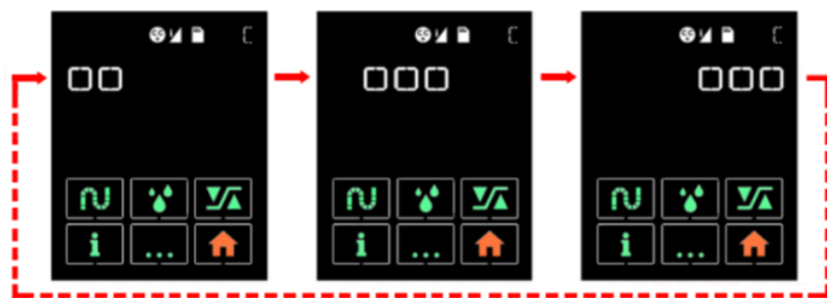

در طول بارگذاری اطلاعات حرکت علامت □ از سمت راست به چپ طبق تصویر بالا نمایش داده می شود، زمانی که علامت ▾ ظاهر شد بارگذاری اطلاعات به اتمام رسیده است. پس از تکمیل بارگذاری اطلاعات MEMORY CARD REMOVE می‌توانید کارت حافظه را از دستگاه خارج کنید و آن را جهت گزارش گیری به شرکت ارائه دهید.


6- تمیز کردن فیلتر دستگاه

فیلتر هر سه هفته یک بار با آب و صابون شستشو دهید و بعد از خشک شدن آن را دوباره داخل دستگاه قرار دهید. از قرار دادن فیلتر بر روی سطوح گرم مانند بخاری خودداری نمائید.
توجه: حتما دستگاه را بدون آب حمل کنید. توجه شود که اگر به هر دلیلی آب به داخل دستگاه وارد شود، بلور (Blower) و سایر قطعات الکترونیکی آسیب خواهد دید که در این صورت دستگاه شامل گارانتی نخواهد شود.

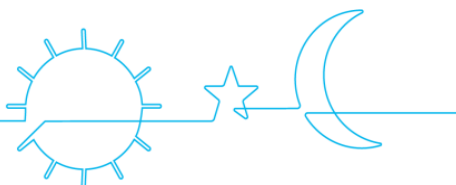


توصیه های مهم:

- در صورت نیاز به جا به جایی، دستگاه را در حالت خاموش و بدون آب حمل کنید و توجه داشته باشید که در صورت ورود آب به دستگاه، دستگاه از گارانتی خارج شده و عواقب آن به عهده خریدار می باشد.
- حتما فیلترهای مربوطه را هر هفته تمیز کنید.
- دستگاه را به هیچ وجه حین کار جا به جا نکنید.
- توصیه می شود ماسک دستگاه را هر ۱ ماه یک بار شست و شو دهید.
- ابتدا منبع تغذیه را به دستگاه را وصل کنید و بعد از آن به برق شهر متصل نمائید
- حتما از سه راهی محافظ دار (محافظ برق) استفاده کنید.
- دستگاه را در محلی دور از گرد و غبار و نور مستقیم آفتاب و مجاورت جریان هوای آزاد (مثل بالکن و...) قرار دهید.
- دستگاه را دور از دستگاه های گرما زا مثل بخاری، آبگرمکن،.... قرار دهید
- مخزن مرطوب کننده دستگاه را هر ماه شستشو نمائید.
- توصیه می شود دستگاه را هر شش ماه جهت سرویس دوره ای با هماهنگی قبلی به شرکت ارسال نمائید.

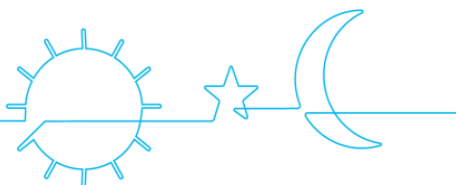

شرایط ضمانت نامه

- ضمانت شامل لوازم و قطعات معیوب (اصلی و داخلی دستگاه) می باشد و هزینه های مربوط به سرویس و قطعات مصرفی (مثل فیلتر، ماسک، مرطوب کننده) را شامل نمی شود.
- هزینه ایاب و ذهاب و نصب و راه اندازی به عهده خریدار می باشد.
- تعمیر دستگاه توسط مراکز غیر مجاز (غیر از شرکت و یا نمایندگی مجاز) منجر به ابطال ضمانت نامه میشود.
- ضمانت نامه مخدوش، ناقص و بدون مهر شرکت فاقد اعتبار است.
- خسارت ناشی از نفوذ آب و گرد و غبار به داخل دستگاه (به هر علت) و شکستگی شامل ضمانت نمی گردد.
- خسارت ناشی از حوادث طبیعی، استفاده نادرست، نوسان برق، ضربه و آتش سوزی شامل ضمانت نامه نمیگردد.
- ارائه هر گونه سرویس (اعم از گارانتی و غیر گارانتی) در روز های کاری و ساعات اداری در محل شرکت میباشد.
- ضمانت نامه به نام شخص خریدار صادر گردیده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

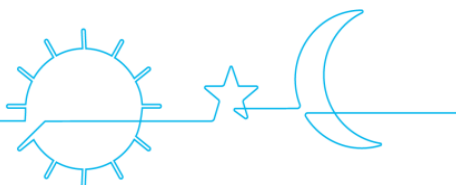



سایت شرکت پرشین ایده آل سیستم




لینک های مورد نیاز




ویدیو نحوه راه اندازی دستگاه



اینستاگرام شرکت پرشین ایده آل سیستم

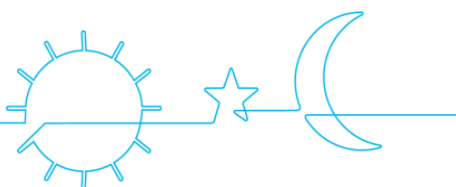

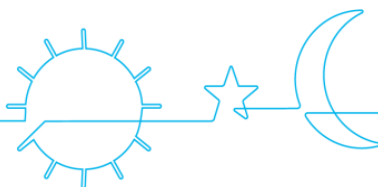

سایر محصولات تحت نمایندگی شرکت پرشین ایده آل سیستم

	CPAP – BIPAP (سی پی پی – بای پی پی) برند sefam – ساخت فرانسه
	دستگاه های تست خواب برند Bitmed ساخت اسپانیا
	اکسیژن ساز خانگی برند Hikoneb ساخت ترکیه
	پالس اکسی متر برند Creative medical ساخت چین
	نبولایز برند Philips ساخت آمریکا
	اکسیژن ساز خانگی برند Sanrai ساخت چین

تهران-خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، گوشه یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۵
شماره تماس : ۰۲۱-۸۸۶۶۳۴۷۶-۷

